

GEBRUIKSINSTRUCTIE

DOORKOPPELEN

Soft Careline - Dagzak (verwisselen twee maal per week, op vaste dagen):



Art. 2048

Inhoud	Lengte slang	Aftap
0,75 liter	Variabel -> Max. 50cm	Kruiskraan met siliconen stukje

De slang van deze beenzak kan op de gewenste lengte (met een schone schaar) afgeknipt worden. Vervolgens dient de los geleverde connector op de slang geplaatst te worden.

CuriBag - Nachtzak (max. 24 uur):



Art. 8758

Inhoud	Lengte slang	Aftap
2 liter	110cm	Kruiskraan

Voor de nacht wordt de nachtzak gekoppeld aan de dagzak.

Voorbeeld van doorkoppelen:



Eenmaal afgekoppeld, dient de urinezak weggegooid te worden.